

ANZAHL BOHREREINSATZ CERALOG® IMPLANTATSYSTEM

Die CERALOG Bohrer sind Mehrpatientenbohrer.

Sie müssen nach mehrfachem Gebrauch ausgetauscht werden, um für jeden Patienten eine gleich gute Schneidleistung der Bohrer sicherzustellen.

Bohrer	Artikel	∅	Art.-Nr.	Maximal 10 Bohrungen
	Spitzbohrer	1.5 mm	B1012	
	Rosenbohrer	2.3 mm	J5050.2300	
	Pilotbohrer	2.0 mm	H5003.2000	
	Formbohrer S	2.9 mm	H5004.2900	
	Formbohrer M	3.4 mm	H5004.3400	
	Knochenprofilbohrer	4.4 mm	B1170	
	Gewindeschneider M	4.0 mm	H5005.4000	



- Die schneidenden Instrumente müssen nach mehrfachem Gebrauch ausgetauscht werden, spätestens aber nach 10 Anwendungen.
- Es dürfen nur scharfe Bohrer und Gewindeschneider verwendet werden, diese müssen unbeschädigt und frei von Korrosion sein.
- Der farbcodierte Tiefenstopp kann bei Bedarf weiter verwendet werden.
- Ausführliche Informationen zur Aufbereitung der Instrumente sind in der „Aufbereitungsanweisung für das CERALOG® Implantatsystem“, Art.-Nr. J8000.0255, beschrieben und müssen beachtet werden.



Instructions for use:
<https://ifu.camlog.com>

Bitte beachten Sie: Weitere Gebrauchsanweisungen und Arbeitsanleitungen zu Produkten von CERALOG finden Sie auf <http://ifu.camlog.com>.