




DEDICAM[®] Nutzungsanleitung WebView

Deutschland, Österreich, Schweiz

Als Kunde des DEDICAM Implantat-Planungsservices stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Fallbeurteilung zur Verfügung. Mit dem Smop WebViewer von Swissmeda ist der Beurteilungs- und Freigabeprozess Ihrer Implantatplanung besonders einfach. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link, über den Sie in Ihrem Browser den Fall beurteilen und freigeben können. Ein zusätzlicher Login oder Download einer Software ist nicht mehr notwendig.

1 Mail zur Freigabe

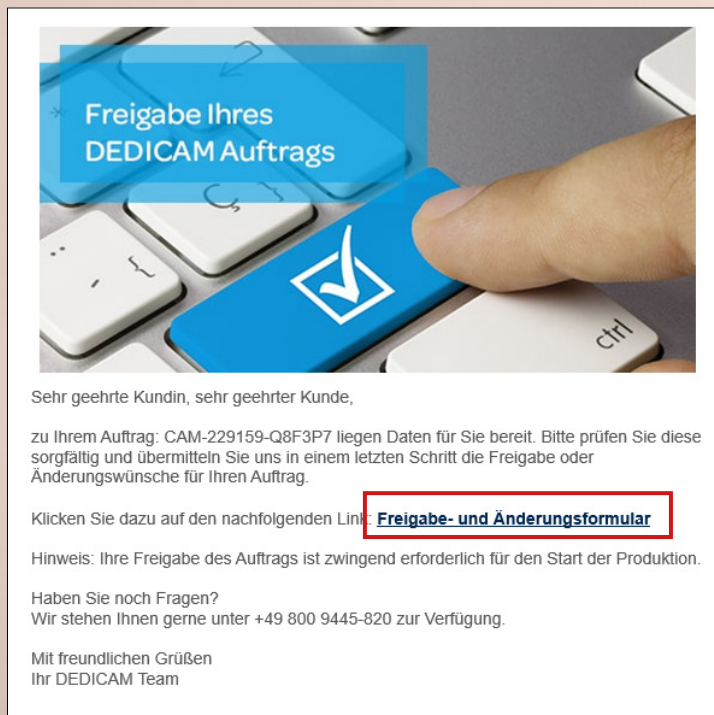

Freigabe Ihres DEDICAM Auftrags

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

zu Ihrem Auftrag: CAM-229159-Q8F3P7 liegen Daten für Sie bereit. Bitte prüfen Sie diese sorgfältig und übermitteln Sie uns in einem letzten Schritt die Freigabe oder Änderungswünsche für Ihren Auftrag.

Klicken Sie dazu auf den nachfolgenden Link: **Freigabe- und Änderungsformular**

Hinweis: Ihre Freigabe des Auftrags ist zwingend erforderlich für den Start der Produktion.

Haben Sie noch Fragen?
Wir stehen Ihnen gerne unter +49 800 9445-820 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr DEDICAM Team

Zur Beurteilung der Fälle erhalten Sie eine Freigabemail an die im Auftrag hinterlegte E-Mail-Adresse. Bitte klicken Sie auf den Link „Freigabe- und Änderungsformular“, um auf die Freigabemaske Ihres Falles zu gelangen.

Anmerkung: Wenn Sie bereits im eService eingeloggt sind, können Sie direkt fortfahren. Andernfalls erscheint ein Login-Fenster, in dem Sie sich mit Ihren eService-Zugangsdaten anmelden können.

2 Freigabemaske

In der Freigabemaske finden Sie alle notwendigen Informationen zu Ihrem Fall. Außerdem können Sie dort direkt auf den WebViewer zugreifen.

1. Informationen im Hinweisfeld beachten
2. OP-Plan herunterladen, öffnen und speichern.
3. WebViewer zur Fallbeurteilung mit dem Klick auf „Zum Webviewer“ öffnen.

Anmerkung: Wenn Sie den WebViewer zum ersten Mal öffnen, müssen Sie sich beim Klick auf den Button „MIT CAMLOG ANMELDEN“ mit Ihren eService-Zugangsdaten anmelden. Dieser Schritt entfällt zukünftig und Sie gelangen direkt zum WebViewer. Das Öffnen des WebViewers kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Anschließend können Sie direkt starten.

Implantat-Planungsservice CAM-229159-Q8F3P7

Patientenkennung
Test

Telefon
+49704495545862

Status
Freigabe offen

Freigabe

Implantat-Planungsservice
Mo - Do: 8.00 - 17.30 Uhr
Fr: 8.00 - 17.00 Uhr
Telefon: [+49 7044 9445-820](tel:+4970449445820)

1.

Hinweise von Ihrem DEDICAM Team zur Freigabe (bitte beachten)
Ihr Fall ist vorbereitet. Bitte prüfen Sie diesen sorgfältig im WebViewer, in dem Sie auf den Link "zum WebViewer" unter dem OP-Plan klicken. Falls Sie Änderungen haben, vermerken Sie diese bitte im Änderungsfeld und lehnen den Fall ab. Wenn alles zu Ihrer Zufriedenheit ist, gerne freigeben.

Die Freigabedokumente stehen Ihnen zum Herunterladen oder zum Öffnen in einem separaten Browserfenster zur Verfügung. Dateien, die direkt geöffnet werden können, sind als Link gekennzeichnet

Dateiname	Download
123456-MGE-SurgicalPlan-PP3.pdf	2. 


3. [Zum Webviewer](#)

3 Fall beurteilen

1. Bissbogen auf orthogonal stellen, falls noch nicht voreingestellt.
2. Implantate anklicken, um diese anzuschauen.
3. Durch die Schichten scrollen, um die Implantatposition zu beurteilen.
Dazu an der gestrichelten Fläche (Scrollbalken) mit gedrückter linker Maustaste durch die Schichten fahren.
4. Durch Drehen des Mausekkrads kann das angezeigte Bild vergrößert oder verkleinert werden.

Bitte prüfen Sie die Planung und geben diese in der Freigabemaske des eService frei.

Falls Sie Änderungswünsche haben, tragen Sie diese im Bemerkungsfeld ein und lehnen den Fall entsprechend ab.

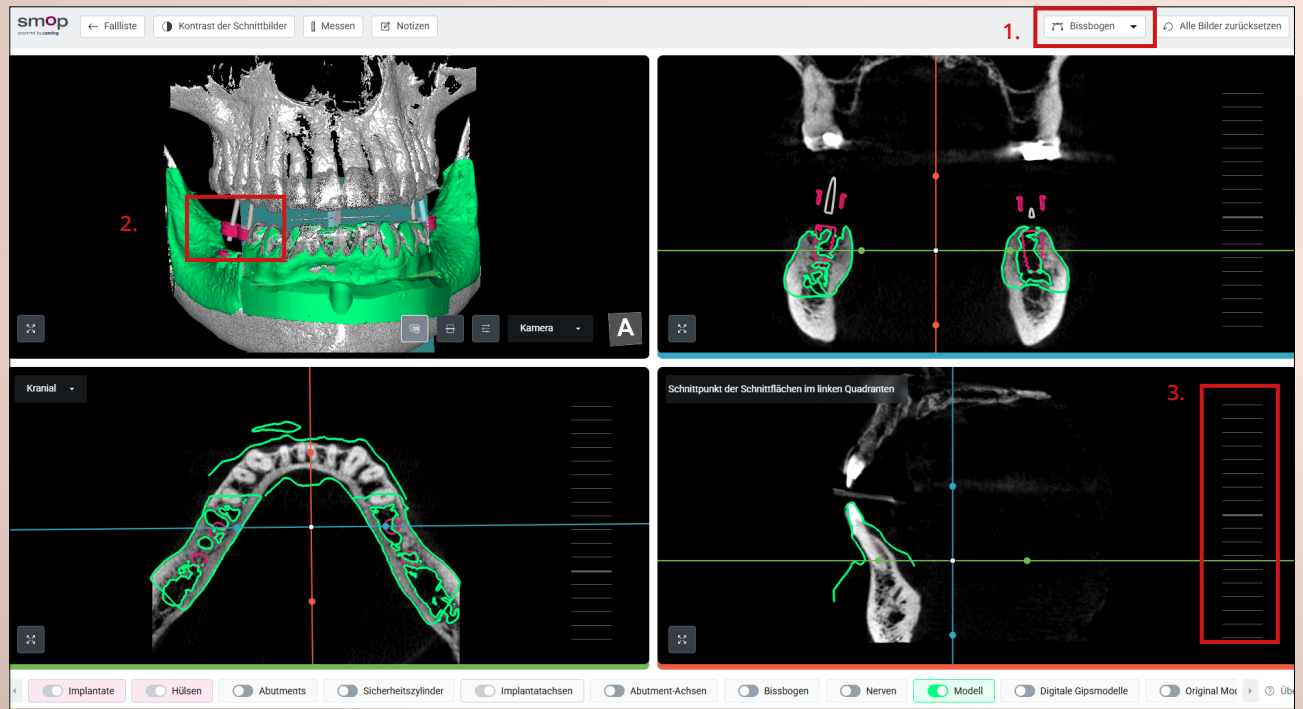

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter **Tel. +49 7044 9445-820**.

Distributor Deutschland

CAMLOG Vertriebs GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland
Telefon +49 7044 9445-100 | Fax +49 800 9445-000 | info.de@camlog.com | www.camlog.de
eshop.camlog.de

Distributor Österreich

ALLTEC Dental GmbH | Schwefel 93 | 6850 Dornbirn | Österreich
Telefon +43 5572 372341 | info@alltecdental.at | www.alltecdental.at
eshop.alltecdental.at

Distributor Schweiz

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz
Telefon +800 028 000 00 | sales.ch@camlog.com | www.camlog.ch
eshop.camlog.ch

Headquarters

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz
Telefon +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.bhclgroup.com

DEDICAM® ist eine eingetragene Marke der CAMLOG Biotechnologies GmbH.
Hersteller aller individualisierten DEDICAM® Produkte:
ALTATEC GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland oder
Biotech Dental Digital SAS | 305, Allées de Craponne | 13300 Salon-de-Provence | Frankreich

* Dieses Dokument bezieht sich auf Produkte von verschiedenen zugelassenen Herstellern.
Bitte entnehmen Sie die Herstelleridentifikation dem jeweiligen Produktetikett.

a perfect fit

camlog