

Implantatversorgung

Prothetik

Abutments, Gingivaformer



1	Arbeitsmodelle ohne Splitcast	
2	Gegenbissmodelle ohne Splitcast (bei Wax-up / aufgestelltem Zahn nicht notwendig)	
3	Abnehmbare Zahnfleischmaske	
4	Implantatplattform freigelegt	
5	ausgeformtes Emergenzprofil	
6	Angaben wieviel Druck auf die vorbereitete Gingiva ausgeübt werden soll	
7	Angaben wie die zervikale Stufe angelegt werden soll	
8	Prothesenzahn aufgestellt - in diesen wird hineinkonstruiert	
9	Alternativ: Wax-up des Abutments	
Hinweis: Gegenbiss in Ausnahmefällen		

Gerüste



1	Arbeitsmodelle ohne Splitcast	
2	Gegenbissmodelle ohne Splitcast / eingegipst auf Sockel	
3	Modelle mit herausnehmbaren und vorbereiteten Stümpfen	
4	Präparationsgrenzen eindeutig markiert	
5	Stümpfe ausgeblockt	
6	Aufstellung eines Prothesenzahnes / bzw. Wax-up bei den Brückengliedern	

Verschraubte Brücken



1	Arbeitsmodelle ohne Splitcast	
2	Gegenbissmodelle ohne Splitcast / eingegipst auf Sockel	
3	Abnehmbare Zahnfleischmaske	
4	Implantatplattform freigelegt	
5	ausgeformtes Emergenzprofil	
6	Angaben wieviel Druck auf die vorbereitete Gingiva ausgeübt werden soll	
7	Angaben wie die zervikale Stufe angelegt werden soll	
8	Wax-up / Mock-up	

Gerüste, anatomisch reduziert



1	Arbeitsmodelle ohne Splitcast	
2	Gegenbissmodelle ohne Splitcast	
3	Modelle mit herausnehmbaren und vorbereiteten Stümpfen	
4	Präparationsgrenzen eindeutig markiert	
5	Stümpfe ausgeblockt	
6	Stümpfe nicht lackiert	
7	Wax-up / Mock-up	

Stege / Implantatbasisstrukturen



1	Arbeitsmodelle ohne Splitcast	
2	Gegenbissmodelle ohne Splitcast (bei Mock-up / Aufstellung nicht notwendig)	
3	Abnehmbare Zahnfleischmaske	
4	Implantatplattform freigelegt	
5	Angaben wieviel Druck auf die vorbereitete Gingiva ausgeübt werden soll	
6	Aufstellung auf abnehmbarer, fester Basis	
7	Alternativ: Wax-up / Mock-up	
8	Angaben zu Stegprofil und ggf. Position der Attachments	
9	Angaben zu Retentionsstiften bei der Implantatbasisstruktur	
Hinweis: Gegenbiss in Ausnahmefällen		

Anatomische Strukturen



1	Arbeitsmodelle ohne Splitcast	
2	Gegenbissmodelle ohne Splitcast	
3	Modelle mit herausnehmbaren und vorbereiteten Stümpfen	
4	Präparationsgrenzen eindeutig markiert	
5	Stümpfe ausgeblockt	
6	Stümpfe nicht lackiert	
7	bei größeren Konstruktionen Wax-up / Mock-up	
8	Angaben zur Kontaktpunktgestaltung	
9	Angaben zum Kontaktpunktgestaltung zum Antagonisten	